

# „MAGNOFLEX®“ riešo raištis

## Prekė 7033

### „Magnoflex®“ riešo raištis naudojamas:

karpalinio kanalo sindromui ir ūmiems bei chroniniams skausmams riešo srityje malšinti.

### Produkto informacija

93/42/EBB: I klasė

Vidinė pusė:

Tarpinis sluoksnis:

Užmagnetinimas :

Išorinė pusė:

UMDNS: **DE/CA22/1150-3** (Miunsterio rajono valdyba), farmacinis centrinis Nr. **1095215**

Specialus antibakterinio poveikio audinys su natūraliais sidabro jonais.

98 % PES (poliesterio), 2 % PA (poliamido)

termosluoksnis

bipoliarinis, 3 kintamo poliariškumo magnetiniai segmentai po 780 gausų, anizotropinis

Limpantis veliūras su porolono pamušalu – 66 % PA (poliamido), 34 % PUR (lengvos putos)

### Naudojimas / naudojimo trukmė

Raištis užsegamas žiedu ir prilipinamas ant išorinės pusės. **Produkto etiketė turi būti nukreipta į viršų.** Naudojimo trukmę nulemia pats naudotojas. Kiekvienas organizmas į magnetinio lauko terapiją reaguoja skirtingai. „MAGNOFLEX®“ magnetinio lauko poveikis yra toks stiprus, kad daugeliui žmonių skausmai sumažėja jau po 1–2 dienų. Ypač jautrūs žmonės teigia, kad poveikį pajautė jau po keleto valandų. Jeigu organizmas priešinasi terapijai, rekomenduojama vidutinė 6 savaičių gydymo trukmė. Sergant lėtinėmis ligomis raištį galima naudoti nuolat.

Magnetinio lauko terapija skatina gijimo procesą ir veikia gydant sveikatos sutrikimus ne simptomiškai, o naikinant susirgimo priežastį, t. y. normalizuojant ląstelėse vykstančius procesus. Aktyvuojamas organizmo stiprinimas ir savigyda, pažeistos funkcijos normalizuojamos. Po magnetinio lauko poveikio gerokai padidėja ląstelių medžiagų apykaita. Termografiniais brėžiniais galima optiškai pavaizduoti ir tuo įrodyti magnetinio lauko kraujo apykaitą skatinantį poveikį.

Dėl natūralių sidabro jonų, kurie veikia kaip antibakterinis agentas, oda apsaugoma nuo dirginimo, pvz., uždegimo ir pabrinkimo, o raiščio vidinė dalis išlieka bekvapė.

### Šalutinis poveikis, pirmasis pablogėjimas

Dažniausiai magnetinio lauko terapija neturi šalutinio poveikio. Ji tinkama naudoti vaikams. Ypač jautriems žmonėms terapijos taikymo pradžioje gali padidėti skausmas, tai rodo, kad magnetinio lauko terapija pradėjo veikti, todėl nerimauti nereikia. Netrukus šis požymis dingsta.

### Kontraindikacijos

**Nežinoma.**

Priežiūros nurodymai. Skalbti rankomis, tik 30° C temperatūroje. Naudoti priemonę, skirtą švelniems audiniams.

MAGNOFLEX® gamyba ir platinimas:

ORGATERM Produktions und Warenvertriebs GmbH,

Aspastraße 24 -59394 Nordkirchen, Vokietija

[info@magnoflex.de](mailto:info@magnoflex.de) [www.magnoflex.de](http://www.magnoflex.de)

### **Atitikties deklaracija**

„ORGATERM Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH“ deklaruoja, kad „Magnoflex“ produktas riešo raištis, prekė 7033 (UMDNS: DE/CA22/1150-1, farmacinis centrinis Nr. **1095215**, Vokietijos patento Nr. 3733502), pagal tobulinimą ir gamybą bei savo pristatytą struktūrą atitinka I klasės medicinos produktų Saugos ir sveikatos reikalavimų direktyvas 2007/47/EB ir 2003/32/EB MPG.

Leidimas 2014-02-05

Apsukite!